


ESPELUX Edu 初回インストール【Mac】

ESPELUX Edu ダウンロード 準備物（全て接続してください）

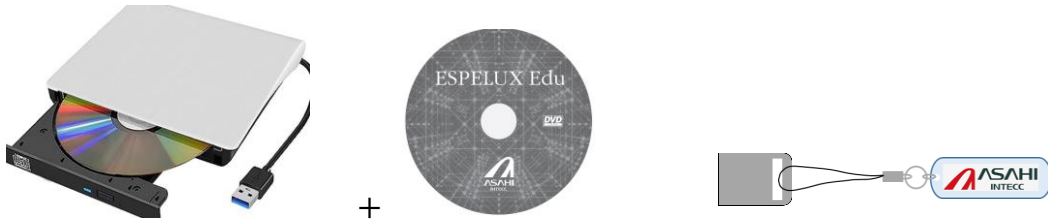

Step1: CodeMeter Runtime のインストール


CodeMeter Runtime(ライセンス認証ツール)のインストールを行ってください(初回のみ)。

※ インストールしていない PC ではアプリを起動できません。

PC を変更した場合は必ず初回にインストールをお願いいたします。


① インストーラーをダブルクリックで起動します

[CodeMeter-Runtime-Installer/CodeMeterRuntime-7.60d-mac.dmg]

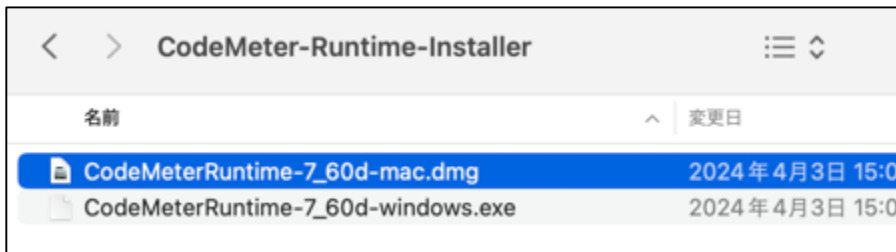


② インストールします

1. 「CmInstall.pkg」をダブルクリック

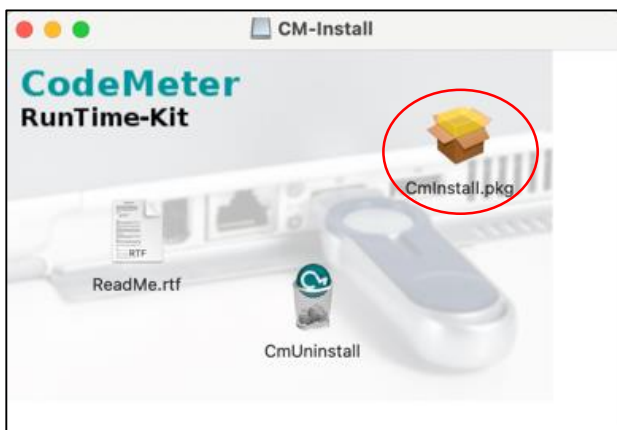

2. 「続ける」をクリック

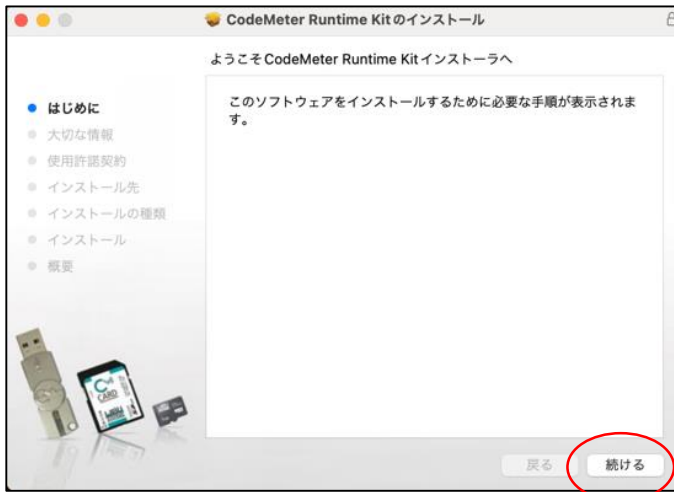


3. 「続ける」をクリック



4. 使用許諾をお読みいただき「続ける」をクリック



5. 「同意する」をクリック

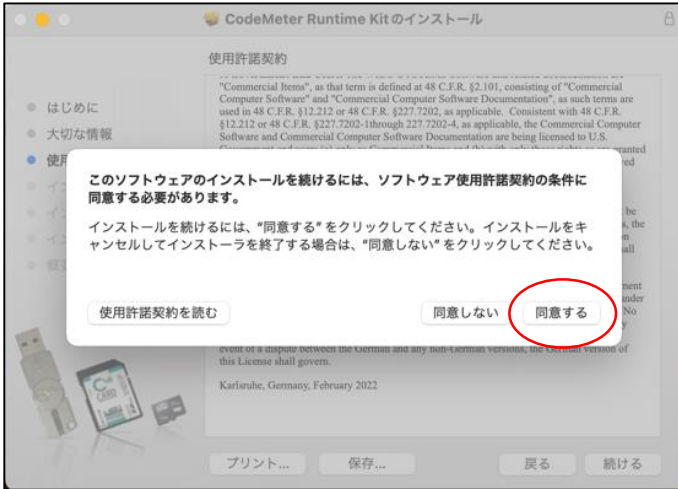

6. 「続ける」をクリック



7. 「インストール」をクリック



8. パスワードを入力し「ソフトウェアをインストール」をクリック




9. インストールが完了したら「閉じる」をクリック



Step2: ESPELUX Edu のインストール

① インストーラーをダブルクリックします

[Mac/ESPELUX-Edu-1_0_0.dmg]

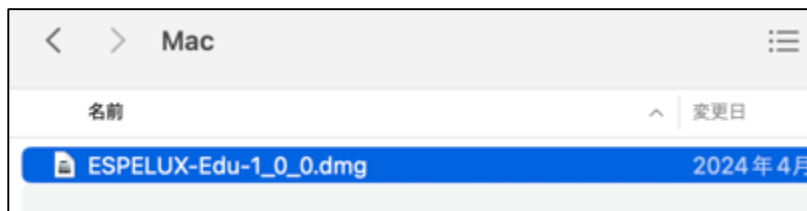

② ESPELUX Edu を Applications フォルダにドラッグアンドドロップします




※ドラッグアンドドロップするとアプリがインストールされ、Applications フォルダに格納される

Step3: ESPELUX Edu の起動

Applications フォルダの ESPELUX Edu をダブルクリックで起動できます。

または、Spotlight 検索で「ESPELUX Edu」と検索し、ESPELUX Edu をダブルクリックで起動できます。

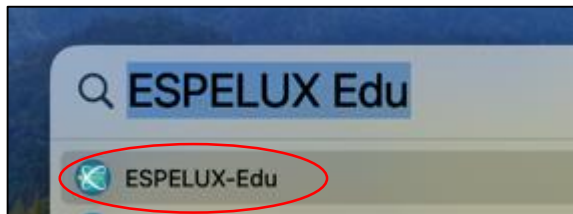


ご注意事項(よくあるご質問事項)

- ディスプレイ解像度: **MacOS: 1680×1050 以上 1710×1112 以下 推奨**
- 計測する際は、View1、2とも Ve1 で計測をお願いします。

ESPELUX Edu 初回インストール【Windows】

ESPELUX Edu ダウンロード 準備物（全て接続してください）

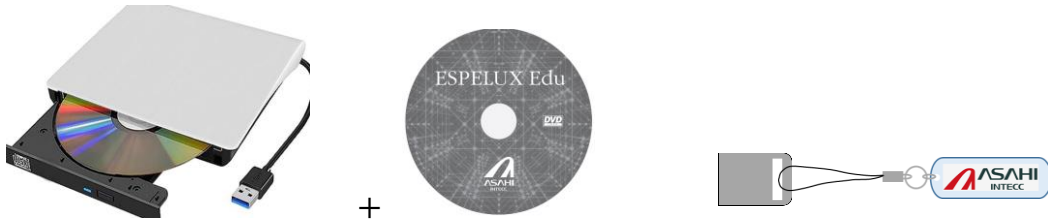

Step1: CodeMeter Runtime のインストール


CodeMeter Runtime(ライセンス認証ツール)のインストールを行ってください(初回のみ)。

※ インストールしていない PC ではアプリを起動できません。

PC を変更した場合は必ず初回にインストールをお願いいたします。

① インストーラーをダブルクリックで起動します

[CodeMeter-Runtime-Installer/CodeMeterRuntime-7.60d-windows.exe]

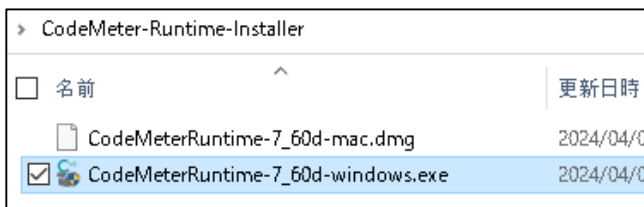


② インストールします


1. 「次へ」をクリック




2. 使用許諾をお読みいただき「同意する」に✓をし、「次へ」をクリック

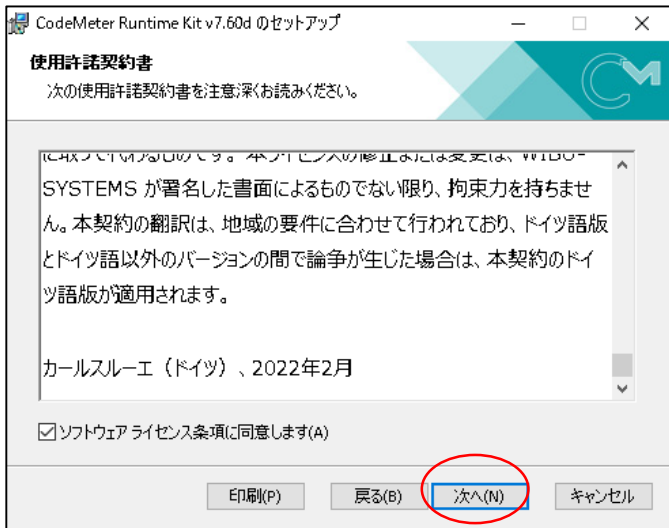


3. 「次へ」をクリック

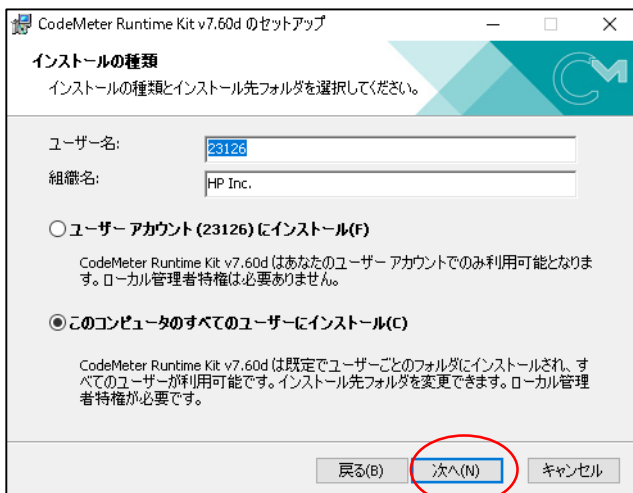

4. 「次へ」をクリック

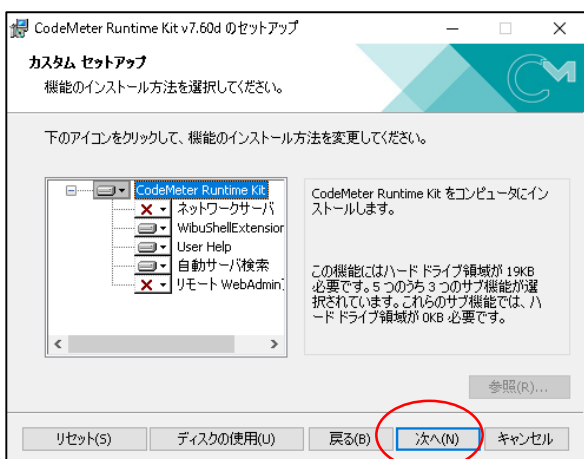

5. 「インストール」をクリック

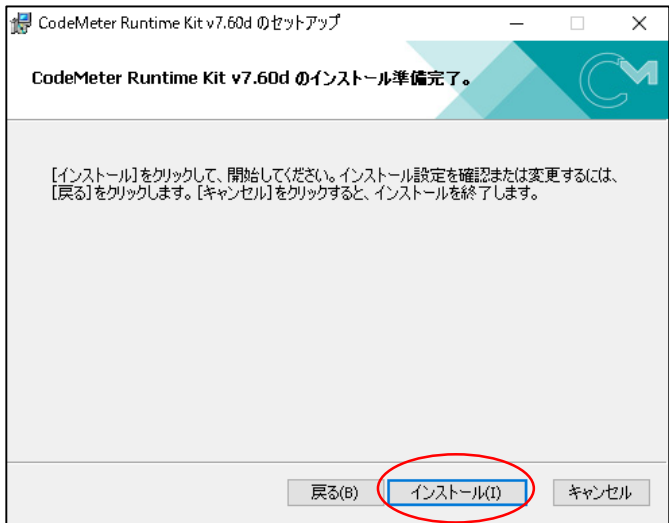



6. 「完了」をクリック




Step2: ESPELUX Edu のインストール

① インストーラーをダブルクリックでインストールします

[Windows/ESPELUX-Edu-1_0_0.exe]

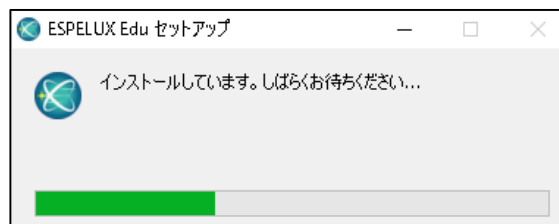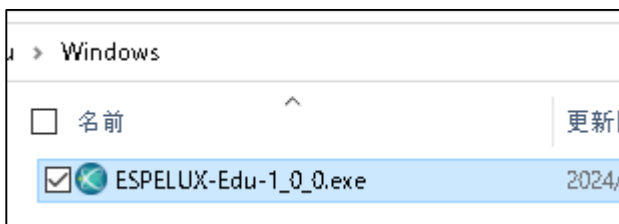

② インストールが完了するとアプリが起動します

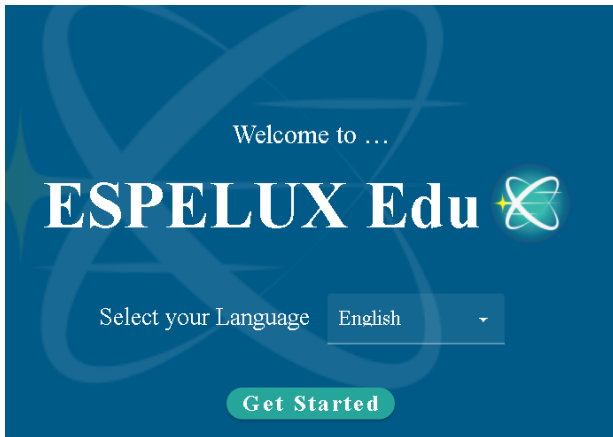

Step3: ESPELUX Edu の起動

初回インストール時にデスクトップにショートカットが作成されるので、2回目以降はショートカットをダブルクリックで起動できます。



または、スタートメニュー から「ESPELUX Edu」を検索し、起動できます。



ご注意事項(よくあるご質問事項)

- ディスプレイ解像度: **Windows: 1920 × 1080(100%) 推奨**
- 計測する際は、View1、2とも Ve1 で計測をお願いします。